


AUDIOCHARTA® compact

D013_Info_D

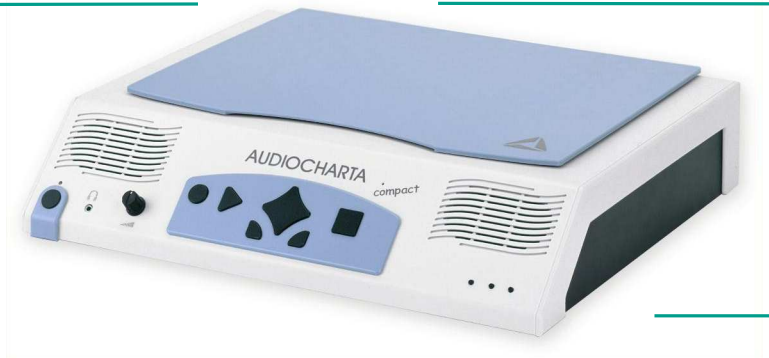

Audiolent: Die auditive Identifikation von Alltagsgegenständen

Sie sind alleine und wollen sich gerne eine Mahlzeit zubereiten. Sie nehmen eine Konservendose aus Ihrem Vorratsschrank und fragen sich, was sie enthält und ob der Inhalt noch genießbar ist.

Hier hilft Ihnen **Audiolent!**

• Was ist Audiolent?

Audiolent ist ein Erweiterungsmodul zu unserem Vorlesesystem **AUDIOCHARTA® compact**. Es besteht aus einer kleinen Kamera, einer sogenannten Web-Cam (Abb.1) und einem kleinen Aufkleber namens Optic-Marker (Abb.2).

• Wie funktioniert Audiolent?

Nach dem Einkauf wird ein Etikett mit einem Optic-Marker auf die Dose geklebt und dieses vor die Kamera gehalten. **AUDIOCHARTA® compact** fordert Sie daraufhin auf eine Bezeichnung zu vergeben, z.B. Erbsen haltbar bis Dez. 2006. Sobald dies geschehen ist, ist Ihre Dose eindeutig gemäß der von Ihnen aufgesprochenen Bezeichnung zugeordnet.

Wenn Sie die Dose das nächste Mal vor die Kamera halten, wird der Marker automatisch erkannt und Ihre aufgenommene Bezeichnung abgespielt. Auf diese Art und Weise können Sie jeden beliebigen Gegenstand in Ihrem Haushalt kennzeichnen und damit auditiv identifizierbar machen.

Nahezu 70 Milliarden Kombinationsmöglichkeiten sorgen dafür, dass es niemals zu einem Engpass an Optic-Markern kommen kann...



Abb.1 Web-Cam



Abb.2 Optic-Marker



Abb.3
AUDIOCHARTA® compact
mit **Audiolent**

Service-Telefon (kostenfrei): +49(0)800 – 159 258 0

Weitere Infos unter: WWW.AUDIOCHARTA.DE

